

뇌파·근전용 비열균 의료용 겔 Elefix V ZV-401E · ZV-181E

본 제품의 일부 사양은 출하된 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다.

※ 일본용 제품은 일본어로 기재되어 있습니다.

영어 등 기타 언어로 되어 있는 내용은 일본의 출하된 제품의 설명서입니다.

Some specifications of this product may differ depending on the destination country or region. Therefore descriptions in the Japanese manual and English and other language manuals may also differ.

본 제품은 전극면과 피부 사이의 접촉 임피던스를 줄이기 위해 체표용 전극과 함께 사용되는 도전성 페이스트입니다.

뇌파 및 근전도 검사 등의 신호 도출용 전극에 사용합니다. 신경 전도 검사 등 전기 자극용 전극에도 사용할 수 있습니다.

사용하기 전에 본 설명서를 잘 읽고 올바르게 사용하십시오.

질량 · 수량

모델명	ZV-401E	ZV-181E
유형	티퍼	튜브
질량	400g / 개	180g / 개
개수:	3개/상자: ZV-401E03	2개 / 상자 : ZV-181E02
주문 코드	10개 / 상자 : ZV-181E10	

심볼 마크 목록

본 제품에는 다음과 같은 심볼 마크가 사용됩니다.

심볼 마크가 나타내는 명칭 및 의미는 아래 표와 같습니다.

심볼마크	명칭 · 의미	심볼마크	명칭 · 의미	심볼마크	명칭 · 의미
	취급설명에 따라시오		의료기기(유럽연합 법령 요구 마크)		유럽 대리인
	주의		로트 번호		사용기한
	직사광선 차단		키랄로트 번호		제조사
	온도 한계		CE 마크		의료기기 표준코드
					모델 번호

주의사항

△ 주의 이 표시를 무시하고 잘못 취급할 경우 사용자의 장해를 입을 가능성이 예상되는 내용 및 물적 손해 발생이 예상되는 내용을 나타냅니다.

△ 주의

- 이 설명서에 기재된 용도 외에 페이스트를 사용하지 않습니다.
- 눈이나 입에 들어간 경우에는 즉시 충분한 양의 물로 씻어내고 의사의 진찰을 받으십시오.
- 상처, 발진, 염종, 감염 부위에는 사용하지 않습니다. (예: 정맥염, 혈전성 정맥염, 정맥류 등)
- 환자에 따라 페이스트 사용으로 피부에 자극을 느끼는 경우가 있습니다. 이 경우 즉시 페이스트를 씻어 내고 해당 환자에게 사용을 중지하십시오.
- 환자 근처나 어린이의 손이 닿는 곳에 두지 않습니다.
- 선진국 때는 의사의 진찰을 받으십시오.
- 본 제품은 체표용 페이스트입니다.
- 사용 후 재사용하지 않습니다.
- 부착용 보고 관련 문이자: 한국의료기기안전정보원 (080-080-4138)
- 고온의 장소나 직사광선에 피하여 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 사용 후에는 반드시 뚜껑을 닫고 보관에 주십시오.

- 자극용으로 사용하는 경우, 페이스트를 지나치게 사용하면 피부에서 자극 전류가 단락되어 자극할 수 없는 경우가 있습니다. 이런 경우, 전극간 페이스트를 거즈 등으로 닦아내주세요.
- 본 제품의 성능은 측정이나 자극 안전성, 유효성에 영향을 줄 수 있습니다.

사용방법

- 전극 부착 부위의 머리카락을 가르고, 피부와 머리카락 뿌리를 알코올 솜으로 잘 문지르고 마른 거즈로 닦아냅니다. 전극 임피던스를 낮추는 경우에는 당사의 피부 전처리제 (스킨프리머)를 사용하십시오.
- 전극 부착 부위에 페이스트를 직경 10mm 이하로 바릅니다.
- 전극에 페이스트를 올린 후 부착 부위의 페이스트와 맞닿도록 하여 부착합니다.
- 거즈 또는 얇은 탈지면 조각으로 전극 위를 덮고 주위를 가볍게 눌러줍니다. 또한 필요에 따라 외과용 테이프 등으로 전극을 고정해 주십시오.
- 검사 종료 후, 피부에 남은 페이스트는 따뜻한 물이나 물을 적신 탈지면으로 완전히 닦아내 주십시오.

전극 관리 방법

사용 후의 전극은 페이스트가 묻어 있으므로, 미지근한 물에 잠시 담가 둔 후, 사용 표면을 손상시키지 않도록 세척해 주십시오. 세척 후에는 마른 천으로 잘 닦아 건조시켜 주십시오.

환경 조건

사용 환경 조건 온도범위: 10~40℃
습도 범위: 30~90%
보존 환경 조건 온도 범위: -10 ~ +40℃
사용기한 제조일 포함 24 개월 (제품에 기재)
【주】 사용 기한이 지난 것을 사용하지 않습니다.

폐기

△ 주의

폐기는 경우에는 각 지자체 또는 시설의 기준을 따릅니다.
감염될 우려가 있는 제품을 폐기하는 경우에는 감염성 폐기물로서 각 지자체 또는 시설의 기준에 따라 주십시오.
제대로 버리지 않으면 감염이나 환경에 영향을 줄 수 있습니다.

전성분

정제수 / 올레스-30 / PEG-60 수산화 피마자유 / 탄산칼슘 / 바세린 / 글리세린 / 알화나트륨 / 프로필렌글라이콜(PG) / PEG-40 수산화 피마자유 / 세타올 / BHT / 메틸파라벤 / 프로필파라벤

재질

ZV-401E 본체: 폴리프로필렌, 두껍: 폴리에틸렌
ZV-181E 튜브 부분: 폴리에틸렌, 캡 부분: 폴리프로필렌

- ※ 기재되어 있는 회사명 · 제품명은 각사의 상표 및 등록 상표입니다.
- ※ 본사의 기재 내용을 무단으로 전제복사하는 것은 저작권 침해입니다.

작성연월 2025.06

製造販売

日本光電

日本光電工業株式会社

東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560
☎03-5996-8000 (代表) Fax 03-5996-8091

<https://www.nihonkohden.co.jp/>