

뇌파용 비멸균 의료용 겔

Z-101N

본 제품은 출하되는 국가나 지역에 따라 사양 등이 다를 수 있습니다.

※ 일본용 제품에 대해서는 일본어로 표기되어 있습니다. 영어 등 기타 언어로 표기된 내용은 일본 이외의 지역으로 출하되는 제품에 대한 설명입니다.

이 제품의 일부 사양은 목적지의 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다. 따라서 일본어 설명서와 영어 설명서와 다른 언어 설명서도 다를 수 있습니다.

Z-101N 뇌파용 페이스트는 뇌파 측정을 할 때 전극과 환자의 피부 사이의 접촉 임피던스를 줄이기 위해 표면 전극과 함께 사용되는 전도성 페이스트입니다. 사용하기 전에 사용설명서를 잘 참조하고 매뉴얼에 따라 페이스트를 적절히 사용하십시오.

주의: 미국 법률에 따라, 이 제품은 의사에 의해 또는 의사의 처방(지시)에 따라 판매가 제한됩니다.

심볼 마크 목록

이 페이스트에는 다음과 같은 기호가 사용됩니다. 각 기호에 대한 설명은 아래 표에 나와 있습니다.

기호	형용	기호	형용
	사용설명서를 따르십시오		카탈로그 번호
			로트 번호
	주의		사용자
	햇빛을 피해 보관하십시오		유럽 대표
	온도 제한		생산자
	CE 마크는 유럽 연합의 보호된 적합성 마크입니다.		처방전 디바이스 (미국 연방법)
	의료 기기 MD 기호는 유럽 연합의 법률에 따라 적용됩니다.		

안전 정보

주의

- 페이스트는 뇌파 측정에만 사용하십시오.
- 페이스트가 눈이나 입에 들어갔을 경우, 즉시 물로 충분히 씻고 의사의 진찰을 받으십시오.
- 피부에 발진, 붉은, 가려움, 붓기 등 이상이 나타나면 즉시 페이스트를 닦아내고 사용하지 마십시오.
- 페이스트를 환자 근처나 어린이의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오.
- 페이스트를 삼킨 경우에는 의사의 진찰을 받으십시오.

- 참고
- 상처나 염증이 있는 피부에 페이스트를 사용하지 마십시오.
 - 페이스트는 가능하면 고온이나 직사 광선을 피해 선선한 곳에 보관해주세요.
 - 페이스트가 건조해지지 않도록 캡을 닫아주세요. 페이스트가 건조해지면 파형을 측정할 수 없습니다.

사용

페이스트는 니혼코덴에서 제조한 뇌파용 일회용 전극에만 사용하십시오. 내부에 충분한 페이스트가 들어 있지 않은 전극에는 추가로 페이스트를 보충해 주십시오.

측정 후 마른 천으로 페이스트를 모두 제거하고 알코올로 적신 면 패드로 환자의 피부를 충분히 닦아 냅니다.

주의: 전극에 페이스트가 너무 많이 묻지 않도록 주의하십시오.

페이스트가 너무 많으면 전극이 단락될 수 있습니다. 페이스트를 너무 많이 바른 경우에는 남은 페이스트를 천으로 닦아내십시오.

환경 조건

사용환경온도: 10 ~ 40°C (50 ~ 104°F) 온도: 30 ~ 90%

보관환경온도: -10 ~ +35°C (14 ~ 95°F). 유효기한은 제조일 포함 12개월(튜브에 인쇄)

주의 : 유효기한이 지난 페이스트는 사용하지 마십시오.

폐기

주의

니혼코덴 제품은 해당 지역의 법률 및 폐기를 처리에 관한 시설의 지침에 따라 폐기해 주십시오. 그렇게 하지 않을 경우, 환경에 영향을 미칠 수 있습니다.

제품이 감염성 물질에 오염되었을 가능성이 있는 경우에는, 지역의 법률 및 시설의 의료 폐기를 지침에 따라 의료 폐기물로 폐기해 주십시오. 그렇게 하지 않으면 감염을 유발할 수 있습니다.

구성

페이스트: 물, 프로필렌 글리콜, 에탄올, 글리세린, 염화나트륨, 히드록시에틸셀룰로오스, 에틸파라벤
튜브: 폴리에틸렌 캡 : 폴리 프로필렌

무게와 수량

무게 : 100g / 개수: 2개 / 상자(주문 코드:

Z- 101N02)

EEA 및 스위스 지역에 거주하는 사용자에게 주의:

장치와 관련하여 중대한 사고가 발생한 경우, 제조업체가 지정한 유럽 대리인 및 사용자 및/또는 환자가 거주하는 EEA 및 스위스 회원국의 관할 당국에 이를 보고해야 합니다.

저작권 표시

이 매뉴얼의 모든 내용은 니혼코덴이 저작권을 소유하고 있습니다. 모든 권리를 보유하고 있습니다.

작성연월: 2025-06