



본 제품은 출하되는 국가나 지역에 따라 사양 등이 다를 수 있습니다. ※ 일본용 제품에 대해서는 일본어로 표기되어 있습니다. 영어 등 기타 언어로 표기된 내용은 일본 이외의 지역으로 출하되는 제품에 대한 설명입니다.

Some specifications of this product may differ depending on the destination country or region. Therefore descriptions in the Japanese manual and English and other language manuals may also differ.

Z-101BA Gelaid는 피부 전극의 접촉 임피던스와 제세동에 의한 피부 화상을 줄이기 위해 설계된 접촉 젤입니다. 사용 전 이 설명서를 잘 읽고 올바르게 사용하십시오.

안전상의 보험 위험은 사망 또는 중상을 일으킬 위험한 상황을 사용자에게 경고하는 데 사용됩니다.

- 경고 '경고는 장비 사용 또는 오용과 관련하여 발생할 수 있는 부상이나 사망의 가능성에 대해 사용자에게 경고하는 것입니다.'
주의 '주의는 장비 오작동, 고장, 손상 또는 다른 자산에 대한 피해, 장비의 사용 또는 오용과 관련된 문제나 손상 가능성을 사용자에게 경고하는 것입니다.'

경고

- 손이 젖거나 접촉 젤이 묻으면 패들 핸들을 잡지 마십시오.
접점 젤은 외부 패들의 전극 플레이트에만 적용됩니다.

주의

- 접촉 젤은 제세동에만 사용하십시오.
피부에 염증이 생기거나, 장시간 제세동 후에 접촉 젤로 인해 피부에 가려움이나 발적(붉어짐)이 나타날 수 있습니다. 사용 후에는 접촉 젤을 잘 닦아내 주십시오.
접촉 젤이 눈이나 입에 들어가면 즉시 물로 충분히 씻고 의사의 진찰을 받으십시오.
접촉 젤을 환자 근처 또는 어린이의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오. 젤을 삼킨 경우 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.
사용방법은 니혼코덴 제세동기의 조작 매뉴얼과 본 매뉴얼을 참조하십시오.
사용 전에 외부 패들의 전극 플레이트에 접촉 젤을 균일하게 도포하여 환자의 피부 화상을 완화합니다.
패들이 접촉 젤에 의해 서로 단락되어 있는 경우에는 에너지를 방전하지 마십시오. 피부에 화상이 발생하거나 심장에 에너지가 제대로 전달되지 않을 수 있습니다.
이 접촉 젤은 외부 패들의 전극 플레이트에 적용하여 피부와 전극의 접촉 임피던스를 줄이기 위해 고안되었습니다. 흉부와 신체의 측면 등 체표면의 제세동에만 사용하십시오. 상처의 제세동에는 절대 사용하지 마십시오.
유효기간이 지난 접촉 젤은 사용하지 마십시오.
사용 후에는 접촉 젤의 뚜껑을 닫아 보관해 주십시오. 접촉 젤 튜브를 열린 상태로 두면 젤이 건조되어, 제세동 시 환자에게 피부 화상을 일으킬 수 있습니다.
부작용 보고 관련 문의처: 한국의료기기안전정보원 (080-080-4183)

심볼

이 Gelaid에는 다음과 같은 기호가 사용됩니다. 각 기호에 대한 설명은 아래 표에 나와 있습니다.

Table with 6 columns: 기호, 의미, 기호, 의미, 기호, 의미. Includes symbols for manual, light, LOT, REF, UKCA, and CE.

Table with 2 columns: 기호, 形容. Contains MD symbol and text: '의료 기기 MD 기호는 유럽 연합의 법률에 따라 적용됩니다.'

사용

- 1. 각 패들의 전극 플레이트에 점점 젤을 균등하게 도포합니다.
2. 사용 후에는 미지근한 물로 15초간 코튼 패드로 접촉 젤을 피부에서 닦아주십시오.

외부 패들 청소

미지근한 물로 적신 면 패드로 외부 패들의 접촉 젤을 닦아 외부 패들을 완전히 말립니다.

환경

작동 조건

온도: 0 ~ 40°C(32 ~ 104°F) 습도: 45 ~ 90%

보관 조건

온도: -10 ~ +35°C(14 ~ 95°F)

만료일

유효기간은 튜브에 인쇄되어 있습니다 만기일은 제조일 (제조일 포함) 부터 24개월입니다.

저장

콘택트 젤은 고온이나 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 보관하십시오.

폐기

접촉 젤의 폐기는 지역 법률을 따르십시오.

조성

콘택트 젤: 프로필렌 글리콜, 염화나트륨, 에탄올, 글리세린, 코코암포아세트산나트륨, 잔탄검, 실리콘 오일, 에틸파라벤, 레몬 에센스
튜브: 폴리에틸렌 캡: 폴리 프로필렌

무게와 수량

100g / 튜브 튜브 2개 / 패키지

작성연월: 2025-06

EEA 및 스위스 지역에 거주하는 사용자에게 주의: 장치와 관련하여 중대한 사고가 발생한 경우, 제조업체가 지정한 유럽 대리인 및 사용자 및/또는 환자가 거주하는 EEA 및 스위스 회원국의 관할 당국에 이를 보고해야 합니다.

저작권 표시 이 매뉴얼의 모든 내용은 니혼코덴이 저작권을 소유하고 있습니다. 모든 권리를 보유하고 있습니다.

Manufacturer information including NIHON KOHDEN EUROPE GmbH, NIHON KOHDEN AMERICA, INC., and contact details for various regions.

