

비밀균 의료용 겔 Skin Pure YZ-0019

본 제품의 일부 사양은 출하된 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다.

※ 일본용 제품은 일본어로 기재되어 있습니다.

영어 등 기타 언어로 되어 있는 내용은 일본 외 출하된 제품의 설명입니다.

Some specifications of this product may differ depending on the destination country or region. Therefore descriptions in the Japanese manual and English and other language manuals may also differ.

본 제품은 생체 신호 모니터링 안정된 파형을 얻기 위한 피부 전처리제입니다. 사용 전에 취급설명서를 잘 읽고 올바르게 사용하십시오.

심볼마크

본 제품에는 다음과 같은 심볼마크가 사용됩니다. 그림 기호가 나타내는 이름과 의미는 아래 표와 같습니다.

심볼마크	명칭·의미	심볼마크	명칭·의미
	로트 번호		직사광선 차단
	온도 한계		제조업체
	유럽 대리인		사용기한
	의료기기 표준코드		CE 마크
	처방 의료 기기		의료기기(유럽연합의 법령 요구 마크)
	취급설명에 따르시오.		모델 번호
	카탈로그 번호		

주의사항

주의 이 표시를 무시하고 잘못 취급할 경우 사용자가 장애를 입을 가능성이 예상되는 내용 및 물적 손해 발생이 예상되는 내용을 나타냅니다.

주의

- 저체중 출생아 및 신생아에게는 사용하지 마십시오.
- 스킨퓨어는 피부 전처리제입니다. 이외의 용도로는 사용할 수 없습니다.
- 피부가 민감한 사람에게는 사용하지 마십시오. 또한, 상처나 염증이 있는 부위에도 사용하지 마십시오.
- 피부를 너무 세게 문지르지 마십시오. 염증을 유발할 수 있습니다.
- 피부에 발진, 가려움, 발진 등의 증상이 나타날 경우, 즉시 사용을 중지하고 스킨퓨어를 씻어내십시오.
- 눈이나 입에 들어간 경우에는 즉시 충분한 양의 물로 씻어내고, 의사의 진료를 받으십시오.
- 삼킨 경우에도 의사의 진료를 받으십시오.
- 부작용 보고 관련 문의처: 한국의료기기안전정보원 (080-080-4183)

[주]: 의사의 지도하에 사용하십시오.

- 사용 기한이 지난 것은 사용하지 마십시오.
- 환자의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오.

- 사용 후에는 반드시 뚜껑을 닫아 보관하십시오. 뚜껑을 연 채 방치하면 스킨퓨어가 건조되어 피부 처리(전처리)가 제대로 이루어지지 않을 수 있습니다.
- 일부 내용물이 굳어 있을 수 있으나, 사용에는 문제가 없습니다.
- 해사(바닷모래)를 사용하고 있으므로, 검은색 입자가 섞여 있을 수 있으나, 사용에는 문제가 없습니다.

사용방법

- 전극 부착 부위를 알코올 솜으로 잘 문질러 지방기를 제거합니다.
- 스킨퓨어를 거즈 등에 적당량 묻혀, 전극 부착 위치의 피부를 가볍게 문질러 줍니다.
- 남은 스킨퓨어는 물에 적신 티슈 등으로 깨끗이 닦아냅니다.

환경 조건

사용 환경 조건

온도 범위: 10~40°C 습도 범위: 30~95%

저장 환경 조건

온도 범위: -10~+40°C

사용기한

제조윌을 포함 24 개월 (튜브에 기재)

보관

고온의 장소나 직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관해 주세요.

폐기

시설 및 지역의 분류 기준에 따라 폐기하십시오.

원료

정제수 / 해사(바닷모래) / 프로필렌글라이콜 / 올레인산칼륨 / 카르복시비닐폴리머나트륨 / 파라클로로메탁시레놀 / 메틸파라벤 / 에디트산이나트륨(EDTA-2Na)

재질

튜브: 폴리에틸렌 캡: 폴리프로필렌

질량·수량

질량: 135g/개 수량 2개/박스

※기재되어 있는 회사명·제품명은 각사의 상표 및 등록 상표입니다.

※본 문서의 기재 내용을 무단으로 전재복사하는 것은 저작권의 침해입니다.

작성 연월: 2025-06

製造販売

日本光電

日本光電工業株式会社

東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560
03-5396-8000 (代表) Fax 03-5396-8091

<https://www.nihonkohden.co.jp/>