

취급설명서

# 심전도용 비멸균 의료용 겔

## Z-101BC cardioCream

본 제품의 일부 사양은 출하된 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다.  
 ※ 일본용 제품은 일본어로 기재되어 있습니다.  
 영어 등 기타 언어로 되어 있는 내용은 일본 외 출하된 제품의 설명입니다.

Some specifications of this product may differ depending on the destination country or region. Therefore descriptions in the Japanese manual and English and other language manuals may also differ.

본 제품은 심전도 검사 시 피부에 바르고 전극과 피부의 전기적 접촉 상태를 보다 양호하게 하기 위한 크림입니다.  
 사용하기 전에 이 설명서를 잘 읽고 올바르게 사용하십시오.

### 심볼마크 목록

본 제품에는 다음과 같은 심볼마크가 사용됩니다.  
 심볼마크가 나타내는 명칭 및 의미는 아래 표와 같습니다.

심볼마크	명칭 · 의미	심볼마크	명칭 · 의미
	취급설명에 따르시오		주의
	제조사		의료기기 표준코드
	로트 번호		모델 번호
	카탈로그 번호,		유럽 대리인
	CE 마크		사용기한
	직사광선을 피하여 보관		온도 한계
	의료기기(유럽연합의 법령 요구 마크)		

### 주의사항

**주의** 이 표시를 무시하고 잘못 취급할 경우 사용자가 장애를 입을 가능성이 예상되는 내용 및 물적 손해 발생이 예상되는 내용을 나타냅니다.

### 주의

- 본 제품은 심전도 검사용 크림입니다. 그 외의 용도로는 사용할 수 없습니다.
- 피부 발진·발적, 가려움, 발진 등의 증상이 나타난 경우에는 즉시 사용을 중지하고 크림을 씻어내십시오.
- 눈이나 입에 들어간 경우에는 즉시 충분한 양의 물로 씻어내고 의사의 진찰을 받으십시오
- 삼켰을 때는 의사의 진찰을 받으십시오.
- 부작용 보고 관련 문의처:  
 한국의료기기안전정보원(080-080-4183)

### 사용방법

(주) · 이 크림은 의사의 지도하에 사용하세요.

- 사용 기한을 넘은 것은 사용하지 마세요.

1. 전극 장착 부위의 피부 지방분을 알코올 솜으로 닦아냅니다.  
 【주】상처나 염증이 있는 부위를 피해 사용하세요.
2. 알코올 솜으로 닦은 부분에 크림을 잘 바릅니다.
3. 전극 접촉면에도 얇게 크림을 도포하여 전극을 장착합니다.
4. 검사 종료 후 온수로 적신 탈지면 등으로 피부에 남은 크림을 닦아냅니다.

### 전극 관리

전극 및 유도 코드의 팁 끝에 남은 크림은 온수로 적신 탈지면 등으로 잘 닦아 충분히 건조시켜 주십시오.

### 환경 조건

사용 온도 범위 10 ~ 40℃  
 보존 온도 범위 -10 ~ +40℃

### 폐기

시설 및 지역의 분류 기준에 따라 폐기하십시오.

### 보관

- 환자의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오.
- 고온의 장소나 직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관하세요.  
 고온 상태로 방치하면 크림이 분리되어 사용할 수 없게 되는 경우가 있습니다.
- 사용 후에는 반드시 뚜껑을 닫고 보관해 주십시오.

### 원료

몰/스테아릴알코올 / 염화나트륨 / 프로필렌글리콜 / 미리스테이트이소프로필 / 솔비톨 / 모노스테아르산아세테이트 글리세롤 / 폴리옥시에틸렌세틸에테르 / 세탄올 / 마이크로 크리스탈린왁스 / 유동파라핀 / 솔비톨모노스테아레이트 / 글리세린모노스테아레이트 / 탄산수소나트륨 / 파라옥시벤조산 프로필 / 파라옥시벤조산메틸

### 재질

튜브 부분 폴리에틸렌  
 캡 부분 폴리프로필렌

※ 기재되어 있는 회사명 · 제품명은 각사의 상표 및 등록 상표입니다.

※ 본 문서의 기재 내용을 무단으로 전재복사하는 것은 저작권 침해입니다.

製造販売

**日本光電**

日本光電工業株式会社

東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560  
 ☎03-5996-8000 (代表) Fax 03-5996-8091

<https://www.nihonkohden.co.jp/>